



Руководство по сборке и эксплуатации

# Orlauf Senti

Перкуссионный массажер

# ORLAUF

WELLNESS



## СОЦСЕТИ

Узнавайте первыми  
о новинках и акциях



## ОФФЛАЙН МАГАЗИНЫ

Протестируйте  
перед покупкой  
и получите экспертную  
консультацию



## СЕРВИС

Получите оперативную  
сервисную поддержку  
и ответы на вопросы

Пн-Пт:

10:00 — 18:00 (GMT+3)

📞 8 (999) 063-51-40

📞 8 (800) 707-24-88

ORLAUF.COM



Актуальные  
инструкции



Сервисная поддержка



Актуальная инструкция



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Меры предосторожности</b>	<b>5</b>
1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора	5
1.2 Правила использования массажера	6
1.3 Правила хранения и эксплуатации	7
<b>2. Комплектация</b>	<b>8</b>
<b>3. Распаковка</b>	<b>9</b>
<b>4. Устройство массажера</b>	<b>10</b>
<b>5. Сменные насадки массажера</b>	<b>11</b>
<b>6. Управление и функции массажера</b>	<b>13</b>
<b>7. Зарядка массажера</b>	<b>15</b>
<b>8. Правила эксплуатации аккумулятора</b>	<b>16</b>
<b>9. Устранение неисправностей</b>	<b>17</b>
<b>10. Спецификация</b>	<b>18</b>

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



*Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.*

## 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### 1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Чтобы избежать риска травм, перегрева устройства или повреждения его компонентов, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- используйте массажер только по назначению, как указано в этом руководстве;
- не используйте устройство в ванной, под душем или рядом с раковиной — массажер не является водонепроницаемым;
- не допускайте попадания влаги на корпус массажера, разъемы и кабель для зарядки;
- следите, чтобы во время зарядки массажера шнур для зарядки не перегибался, не перекручивался, не находился под натяжением и не прижимался посторонними предметами;
- не прикасайтесь к кабелю для зарядки мокрыми руками;
- держите шнур для зарядки подальше от нагретых поверхностей;
- заряжайте массажер только с использованием рекомендованных зарядных устройств и кабелей;
- не подключайте устройство к поврежденному источнику для зарядки;
- не накрывайте массажер во время работы и не используйте его под подушками или одеялами — это может привести к перегреву;
- не нажимайте повторно на кнопку питания в течение короткого промежутка времени;
- перед каждым использованием осматривайте корпус массажера;

не используйте устройство при наличии видимых повреждений, таких как трещины или вздутия;

- не допускайте падения предметов на массажер и проливания жидкости;
- убедитесь, что на устройстве или вашей одежде нет булавок, металлических застёжек и других посторонних предметов;
- не разбирайте массажер и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно; при неисправности обратитесь в сервисный центр;
- храните массажер в недоступном для детей месте.

## 1.2 Правила использования массажера

- Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для лечения или профессионального применения.
- Используйте массажер только так, как указано в инструкции. Не применяйте дополнительные аксессуары, не одобренные производителем.
- Устройство предназначено исключительно для взрослых пользователей. Дети и лица с ограниченными возможностями могут использовать массажер только под присмотром.
- Перед первым использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, кардиостимуляторов или металлических имплантатов.
- Не используйте массажер при плохом самочувствии, высокой температуре, воспалениях, варикозном расширении вен, тромбозе, онкологических заболеваниях, кожных высыпаниях, повреждениях кожи, во время беременности, а также при других противопоказаниях.
- Не направляйте массажер на голову, позвоночник, шею, почки,

половые органы или область щитовидной железы.

- Если во время массажа вы почувствуете боль, дискомфорт или онемение — немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Не используйте массажер одновременно с другими устройствами для прогрева, например, электрическим одеялом.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера.
- Не роняйте массажер и не используйте его при механических повреждениях.
- Не используйте массажер дольше 20 минут без перерыва. Между сеансами рекомендуется делать паузу не менее 10–15 минут для предотвращения перегрева устройства.

### 1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Храните массажер в безопасном, сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, влаги и пыли.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур — это может повредить корпус и внутренние компоненты.
- Используйте массажер только в помещении.
- Избегайте ударов, падений и чрезмерного давления на устройство.
- Чрезмерное или непрерывное использование может привести к перегреву и сократить срок службы массажера. При перегреве остановите сеанс и дайте устройству полностью остыть перед повторным включением.
- Для защиты устройства от пыли и случайных повреждений храните его в защитном кейсе, который входит в комплект.

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 1 – Комплектация массажера

Описание	Кол-во
Перкуссионный массажер	1 шт.
Кабель для зарядки с USB Type-C	1 шт.
Сферическая насадка	1 шт.
Плоская насадка	1 шт.
Насадка-пуля	1 шт.
U-образная насадка	1 шт.
Акупунктурная насадка	1 шт.
Насадка-лопатка	1 шт.
Дугообразная насадка	1 шт.
Антицеллюлитная насадка	1 шт.
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

### 3. РАСПАКОВКА

- Откройте коробку и достаньте из нее кейс с массажером.
- Откройте кейс и убедитесь, что внутри находятся все комплектующие.
- Перед первым использованием полностью зарядите массажер согласно инструкции из раздела «Зарядка устройства».
- Когда массажер не используется, храните его в защитном кейсе, чтобы предотвратить повреждения и сохранить комплектность устройства.

## 4. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

1. Сменная массажная насадка.
2. Ручка.
3. LED дисплей.
4. Кнопка увеличения интенсивности массажа.
5. Кнопка уменьшения интенсивности массажа.
6. Кнопка питания.
7. Разъем для зарядки устройства Туре-С.

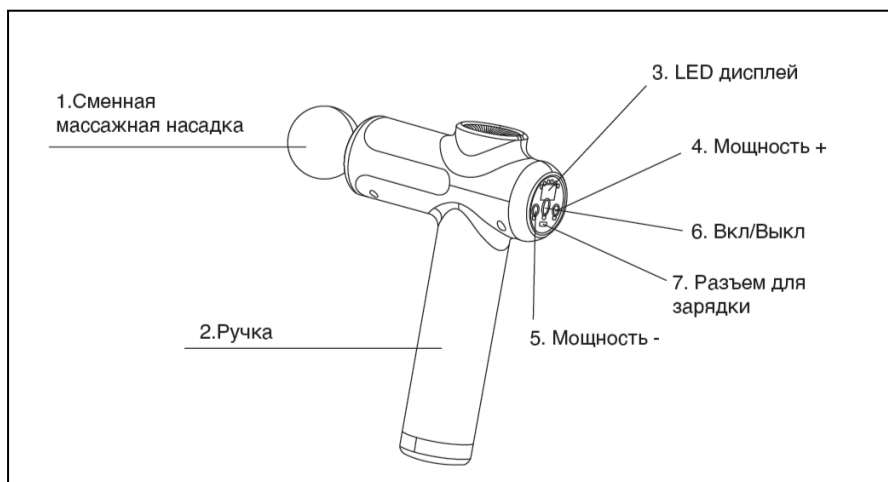


Рисунок 1 — Устройство массажера

## 5. СМЕННЫЕ НАСАДКИ МАССАЖЕРА

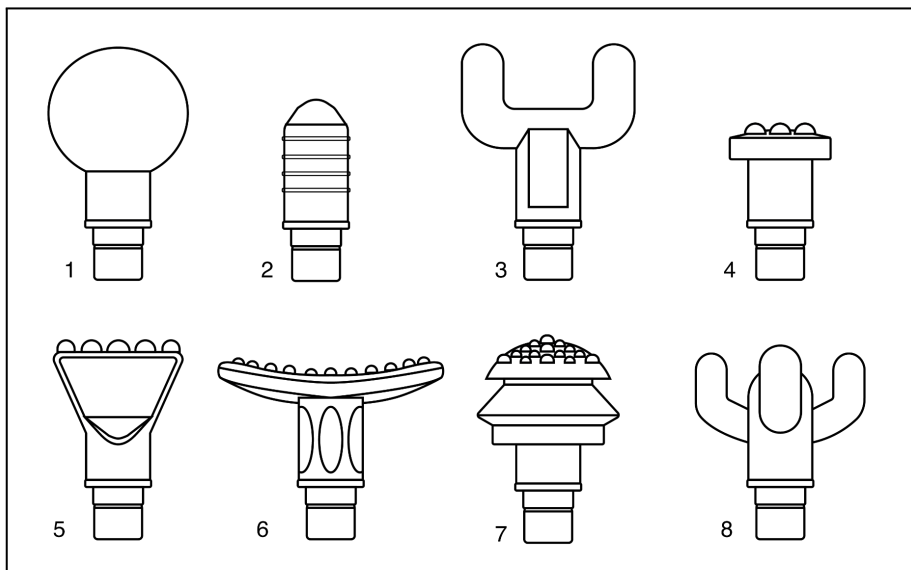


Рисунок 2 – Сменные насадки

**1. Сферическая насадка.** Для проработки крупных мышечных групп: квадрицепсов, ягодиц, икроножных мышц, живота и плечевого пояса. Мягко массирует ткани, ускоряет кровообращение и способствует быстрому восстановлению после нагрузок.

**2. Насадка-пуля.** Для точечного глубокого воздействия на триггерные точки, ладони, стопы и сухожилия. Проникает к глубоким слоям, быстро убирает локальную боль и спазмы.

**3. U-образная насадка.** Для массажа мышц вдоль позвоночника и шеи. Точно воздействует на длинные мышцы, снимает зажимы и восстанавливает подвижность.

**4. Плоская насадка.** Для равномерной проработки мягких тканей всего тела: поясницы, грудных мышц, бедер и плеч. Снимает мышечное напряжение, улучшает лимфо и кровообращение.

**5. Насадка-лопатка.** Предназначена для мягкого массажа вдоль мышечных волокон предплечий и ног. Обеспечивает точечное воздействие, снимает поверхностное напряжение и помогает расслабить уставшие мышцы после тренировок или активного дня.

**6. Дугообразная насадка.** Разработана для массажа верхней части спины, плеч и рук. Благодаря широкому покрытию и мягким выступам деликатно воздействует на поверхность мышц, улучшает кровообращение и помогает снять напряжение после длительных нагрузок.

**7. Антицеллюлитная насадка.** Для интенсивного массажа проблемных зон: бедер, ягодиц и боковых участков живота. Активирует микроциркуляцию и лимфодренаж, способствует расщеплению жировых отложений, выравнивает рельеф и повышает упругость кожи.

**8. Акупунктурная насадка.** Предназначена для массажа икроножных мышц и четырехглавой мышцы бедра. Обеспечивает симметричное воздействие по обе стороны мышцы, помогает снять напряжение, улучшить эластичность тканей и ускорить восстановление после физических нагрузок.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА

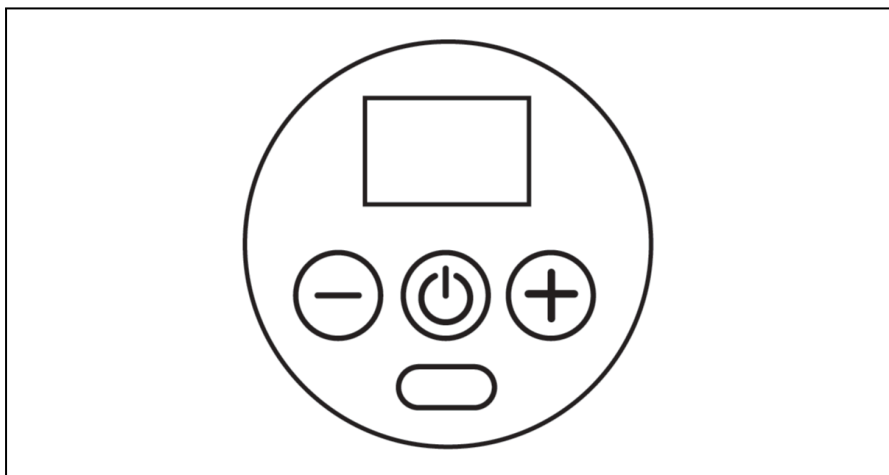


Рисунок 3 – Панель управления и дисплей массажера

### **Кнопка питания.**



- Короткое нажатие в режиме ожидания отображает уровень заряда батареи на дисплее.
- Длительное нажатие (2-3 секунды) на кнопку питания запускает или завершает работу массажера.



### **Кнопка увеличения интенсивности массажа.**

Короткое нажатие увеличивает интенсивность массажа.



### **Кнопка уменьшения интенсивности массажа.**

Короткое нажатие уменьшает интенсивность массажа.



**Примечание:** массажер можно использовать 1-2 раза в день, не рекомендуется использовать дольше 20 минут за раз.



**Примечание:** сеанс массажа длится 15 минут, после чего массажер отключается.



**Примечание:** при легком касании, массажная насадка движется в соответствии с установленным уровнем интенсивности, если прижать насадку к телу, то интенсивность увеличится.

## 7. ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА

- Подключите зарядный кабель к порту Type-C и к порту USB.
- Отсоедините зарядный кабель после полной зарядки устройства.
- Уровень заряда батареи отображается на дисплее.



**Внимание!** Массажер не должен использоваться во время зарядки. Проверьте уровень заряда до начала работы с массажером. Полностью зарядите массажер перед первым применением.



**Внимание!** Во избежание повреждений при резком возобновлении подачи электричества, рекомендуется отсоединить массажер от зарядного устройства во время перебоев с электроэнергией.

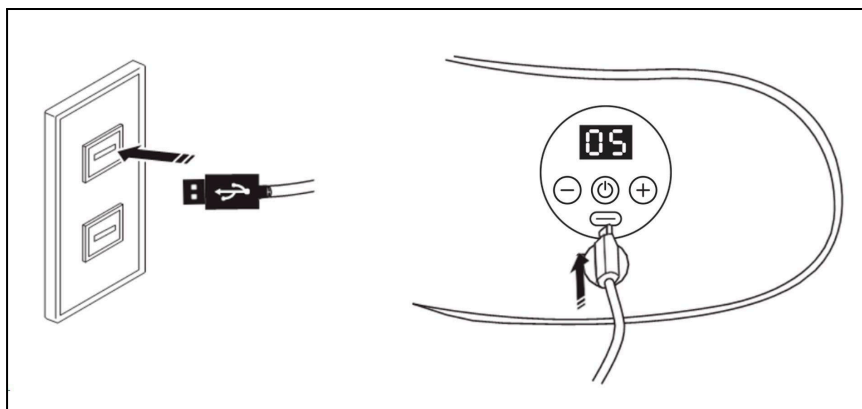


Рисунок 4 — Зарядка массажера

## 8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

Массажер содержит литий-ионный аккумулятор, который необходимо переработать или утилизировать надлежащим образом. Обратитесь в местное управление по утилизации отходов для получения информации о переработке или утилизации аккумуляторов.

### **Обращение с аккумуляторами:**

- при контакте с жидкостью из элемента аккумулятора промойте пораженные участки водой и обратитесь за медицинской помощью;
- взрывоопасно, поэтому никогда не бросайте аккумулятор в огонь;
- не разбирайте, не открывайте и не ломайте аккумулятор;
- используйте только входящее в комплект зарядное устройство;
- перед первым использованием аккумулятор должен быть полностью заряжен;
- необходимо постоянно следить за правильной зарядкой;
- полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

## 9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел о наиболее распространенных проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации. Если рекомендации не помогли, свяжитесь с сервисным центром или его представителем.

Таблица 2 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не работает.	1. Низкий уровень заряда устройства.  2. Массажер только что завершил работу (прошло 15 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился.	1. Зарядите устройство.  2. Нажмите кнопку питания.
Слабый массаж.	Низкий уровень заряда устройства.	Зарядите устройство.
Массажер сильно нагрелся.	Массажер непрерывно работал длительное время.	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут, после чего вы сможете использовать его снова.

## 10. СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Вид массажа</b>	перкуSSIONный
<b>Массажные манипуляторы, шт.</b>	1
<b>Кол-во массажных насадок, шт.</b>	8
<b>Уровни интенсивности массажа</b>	99
<b>Таймер</b>	автоотключение через 15 минут
<b>Размер (Д*Ш*В), см</b>	16x5x23
<b>Вес нетто, кг</b>	0,5
<b>Вес брутто, кг</b>	1
<b>Размер упаковки (Д*Ш*В), см</b>	28x8x21
<b>Напряжение питания</b>	5В 2А
<b>Мощность, Вт</b>	80
<b>Батарея, мАч</b>	1800
<b>Время работы, мин.</b>	90
<b>Время зарядки батареи, час</b>	4

<b>Поставщик/Импортер</b>	ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабиrowsкая ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
<b>Завод-изготовитель</b>	Fuan Lianhe Health Technology Co., LTD. Building 1, NO.318 Century Avenue, Fuan, Fujian,China Tel: +86 199 5933 3557
<b>Страна изготовления</b>	КНР
<b>Дата изготовления</b>	Указана на этикетке
<b>Гарантия</b>	12 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте [www.orkauf.com](http://www.orkauf.com)

Сайт производителя <https://orkauf.com/>.



**ORLAUF**

